



TODO TALÓN

NECESITA PROTECCIÓN.

Protección del talón

Para la prevención y atención de las lesiones por presión

Por qué es importante la protección del talón.

Los talones son el sitio más común para sufrir lesiones por presión causadas en centros de atención a largo plazo y el segundo sitio más común para lesiones por presión en general.⁴ Comúnmente se asocian con dolor intenso, riesgo de infección y hospitalizaciones prolongadas. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) no le pagan a los hospitales por el tratamiento de las lesiones por presión en etapa III o IV que no estén presentes al momento de la admisión.

Las cifras no mienten.

Las lesiones por presión afectan a millones de personas cada año y pueden causar dolor intenso, infección y hospitalizaciones prolongadas. Los talones son el segundo sitio más común para las lesiones por presión en general, pero son prevenibles.⁴

\$9-11
MIL MILLONES

Costo anual de tratar lesiones por presión en los Estados Unidos.²

2.5
MILLONES

Número de personas en los Estados Unidos afectadas por lesiones por presión cada año²

60,000

Número de pacientes que mueren como resultado directo de lesiones por presión cada año²

\$43,180

Costo promedio de una hospitalización por lesiones por presión en etapa III y IV²

30.3%

Porcentaje de todas las lesiones por presión que se producen en el talón³

Medline es su fuente integral de productos de protección del talón.

Según los expertos clínicos, la forma más eficaz de prevenir las lesiones por presión en los talones es el alivio de la presión que se conoce como descarga.⁴ La descarga se logra con productos de protección que alivian la presión pues elevan el talón. Medline ofrece una amplia gama de productos de protección del talón para adaptarse a sus necesidades y presupuesto. Estos productos son un componente vital del programa de prevención de lesiones por presión en su centro.

HeelMedix® Advanced

Como parte vital de su programa de prevención de lesiones por presión, HeelMedix Advanced, diseñada con la ayuda de profesionales clínicos, ofrece una excelente capacidad de descarga y protección contra la caída del pie.



¿SABÍA USTED?

49 % de los profesionales clínicos no están muy familiarizados con la colocación correcta de las botas de descarga para el talón.⁵

HeelMedix Advanced presenta un diseño intuitivo:

- » Empaque educativo
- » Sistema de tiras codificadas por colores para garantizar una colocación adecuada
- » Serigrafía instructiva
- » Tomas de tubería para TVP codificadas por colores para una fácil estandarización en los centros

Las tiras azules y verdes codificadas por colores se halan de los lados para ayudar a proteger contra la caída del pie

Instrucciones serigrafiadas en las tiras

Se puede usar una cuña opcional para ayudar a prevenir la rotación medial y lateral.

Beneficios

- » Descarga completamente el talón y ayuda a redistribuir la presión sobre los talones vulnerables
- » Tratadas con antimicrobiano Ultra-Fresh® para ayudar a inhibir las bacterias causantes de malos olores.
 - El antimicrobiano Ultra-Fresh con registro EPA no protege a los usuarios ni a otras personas contra bacterias que causan enfermedades. Límpielo siempre de acuerdo con las instrucciones de uso.
- » Las tiras se halan de los lados para ayudar a proteger contra la caída del pie
- » El forro interior ayuda a reducir la fricción y el cizallamiento; la mitad de la fricción que la competencia*
- » Incluye bolsa de lavandería tipo malla para simplificar el lavado y la clasificación

N.º de artículo	Descripción	Paquete
MDT823330P	Pequeño, 5-11 pulg. (12.7-27.9 cm)	1 c/u
MDT823330SW	Estándar c/cuña, 11-19 pulg. (27.9-48.2 cm)	1 c/u
MDT823330	Estándar, 11-19 pulg. (27.9-48.2 cm)	1 c/u
MDT823330CS	Estándar, 11-19 pulg. (27.9-48.2 cm)	4/cartón
MDT823330XL	Extragrande c/cuña, 19-25 pulg. (48.2-63.5 cm)	1 c/u
MDT823330W	Cuña estabilizadora	2 c/u
MDT823331W	Cuña estabilizadora	1 c/u

* Datos en archivo.

¿SABÍA USTED?

50 % de los profesionales clínicos no tiene herramientas de medición disponibles para determinar el tamaño de las botas de descarga.⁵

Use la regla incluida para determinar el tamaño correcto. Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes.



A fin de calzar HeelMedix Advanced correctamente, use la regla incluida para medir la circunferencia de la pantorrilla del paciente en su punto más grande. Las etiquetas codificadas por colores ayudan a identificar rápidamente el tamaño.



Circunferencia de pantorrilla de 5-11 pulgadas (12.7-27.9 cm)



Circunferencia de pantorrilla de 11-19 pulgadas (27.9-48.2 cm)



Circunferencia de pantorrilla de 19-25 pulgadas (48.2-63.5 cm)

¿SABÍA USTED?

71 % de los profesionales clínicos ha descubierto que el paciente o un familiar ha retirado las botas de descarga.⁵

Información para el paciente

Cada producto HeelMedix para la protección del talón incluye una tarjeta informativa para el paciente y la familia donde se explican los beneficios de la bota de descarga.



Protección antimicrobiana incorporada.

HeelMedix Advanced es el único producto para el talón que lleva el nombre Ultra-Fresh®, lo que significa que usted puede tener la certeza de que nuestros productos están tratados con agentes antimicrobianos para inhibir el crecimiento de microbios no deseados dentro del producto para el talón. Estas propiedades antimicrobianas están integradas para proteger el producto. Este producto no protege a los usuarios u otras personas contra bacterias, virus, gérmenes u otros organismos causantes de enfermedades.


- » Ultra-Fresh ayuda a inhibir el crecimiento de bacterias y hongos causantes de olores y manchas desagradables
- » Ultra-Fresh ayuda a controlar los microbios no deseados en la tela para ayudar a mantener los productos frescos, higiénicos y sin olores



¿SABÍA USTED?

54 % de los profesionales clínicos se ha encontrado con botas de descarga que producen mal olor.⁵

Cómo Ultra-Fresh mantiene los productos para el talón frescos y protegidos⁶

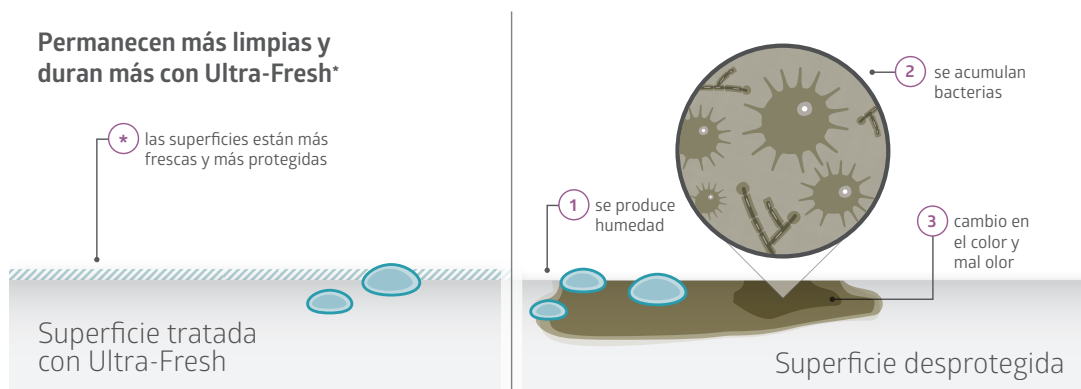


Estudio 1: Evaluación de la protección antibacteriana


Los protectores de talón pueden albergar bacterias provenientes del ambiente húmedo creado por la transpiración y la abundancia de nutrientes. La proliferación de estos microbios puede causar olores no deseados. HeelMedix Advanced, con protección Ultra-Fresh incorporada, demostró una excelente actividad antibacteriana en comparación con las botas sin tratar.

Resultados y conclusión*

- » HeelMedix Advanced tratada con Ultra-Fresh demostró una excelente actividad antibacteriana contra el organismo de prueba SARM* al inhibir el crecimiento bacteriano debajo de la muestra
- » Las muestras de botas no tratadas no mostraron actividad antibacteriana, lo que permitió la proliferación de SARM*. HeelMedix Advanced tratada con Ultra-Fresh permanecerá limpia, fresca y sin olor.
- » Método de prueba AATCC 147 – *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina (SARM)*

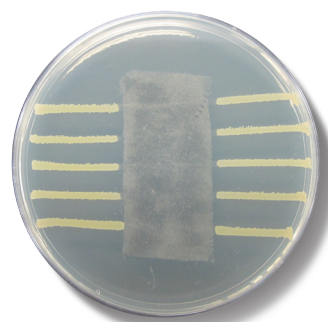

Bota tratada con Ultra-Fresh

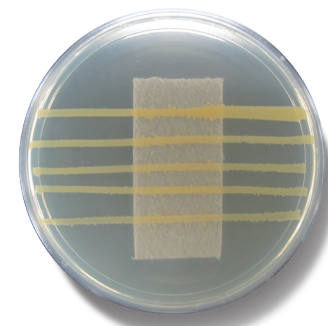

Botas no tratadas

Método de prueba AATCC 147 – *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina (SARM)*

Descripción de la muestra	Resultados de la prueba	
	Observación visual	Conclusión
HeelMedix Advanced tratada con Ultra-Fresh	No hay crecimiento bacteriano debajo de la muestra	Pasa
Botas para el alivio de presión azules sin tratar	Crecimiento bacteriano intenso debajo de la muestra	Falla
Botas para el alivio de presión verdes sin tratar	Crecimiento bacteriano intenso debajo de la muestra	Falla

* El *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina (SARM) es un organismo de prueba estándar y su uso no pretende indicar ningún beneficio del tratamiento Ultra-Fresh que no sea la protección contra olores y manchas y la prevención contra la degradación del producto.


Las pruebas muestran que HeelMedix Advanced ofrece una descarga del talón excepcional.

Estudio 2: Descarga del talón*

Con el uso de una alfombrilla detectora de presión, 19 pacientes en un centro de atención a largo plazo fueron sometidos a pruebas de presión del talón en un colchón, en un producto HeelMedix y en el producto de la competencia. HeelMedix descargó completamente el área vulnerable del talón. Las siguientes son las conclusiones del mapeo de presión:



La línea roja punteada indica el talón

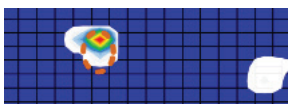


Presión promedio en el área de contacto **115.23**
El colchón tuvo la presión de talón más alta.



Presión promedio en el área de contacto **41.71**
Presión promedio de la competencia en el área de contacto.



Presión promedio en el área de contacto **29.82**
HeelMedix descargó completamente el área vulnerable del talón.

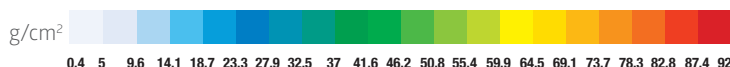

Estudio 3: Flexión plantar


La flexión plantar prolongada, un movimiento descendiente hacia la punta del pie desde el tobillo, puede contribuir a la caída del pie. La caída del pie es una condición de la flexión plantar no controlada que puede ocurrir en pacientes que no pueden caminar.

Resultados y conclusiones*

» El diseño de tiras en HeelMedix Advanced pudo evitar la caída del pie más allá de 40 grados en todas las condiciones de fuerza, mientras que la descarga del talón en la bota de la competencia no pudo detener este grave ángulo de caída del pie.

Presión máxima ejercida sobre el ángulo

El diseño de tiras de HeelMedix Advanced pudo evitar la caída del pie más allá de 40 grados en todas las condiciones de fuerza.

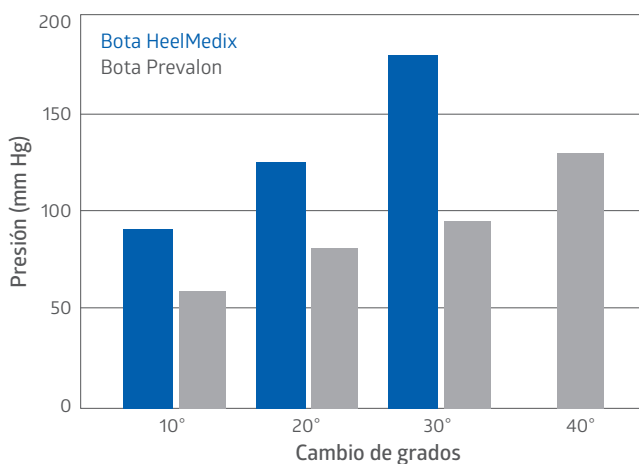

¿SABÍA USTED?

HeelMedix Advanced demostró que su **resistencia** a la flexión plantar es **24.5 % mayor** frente a la competencia y además tiene **el doble de la fuerza de apoyo.***

*Datos en archivo

ADVANCING THE HEALTH OF HEALTHCARE.™

En el complejo mundo de la atención de la salud, la misión de Medline es ayudar a nuestros clientes a alcanzar el éxito clínico y económico. Lo hacemos a través de un enfoque personalizado para escuchar y comprender mejor las necesidades de nuestros clientes en un ambiente que siempre requiere menores costos y mejores resultados.

Gracias a nuestras capacidades y al contacto con líderes de opinión del sector y del ámbito clínico, proporcionamos la más completa cartera de productos y soluciones para la atención de pacientes para ayudar a los proveedores de atención de la salud a dar lo mejor de sí. Esto es lo que nos define y es el motivo por el que nuestros clientes nos eligen como su socio comercial confiable.

Para obtener más información, comuníquese con su representante de Medline, visítenos en medline.com o llame al 1-800-MEDLINE.



Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093

Medline Estados Unidos
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline Canadá
1-800-396-6996
medline.ca | canada@medline.com

Medline México
01-800-831-0898
medlinemexico.com | mexico@medline.com

SÍGANOS



BIBLIOGRAFÍA 1. Registro Federal: Departamento de Salud y Servicios Humanos, Centros de Servicios de Medicare y Medicaid Parte II, p. 48473 martes, 19 de agosto de 2008. 2. <http://www.ahrq.gov/professionals/systems/long-term-care/resources/pressure-ulcers/pressureulcertoolkit/putool1.html> 3. Amlung SR, Miller WL, Bosley LM, "The 1999 National Pressure Ulcer Prevalence Survey: A Benchmarking Approach," Adv Skin & Wound Care. Nov/Dec 2001;14(6):297-301 4. Fowler E, Scott-Williams S, McGuire JB. Practice recommendations for preventing heel pressure ulcers. Ostomy Wound Management. 2008;54(10):42:48. 5. Datos archivados. 6. <http://www.ultra-fresh.com/how-antimicrobialswork/fresh/>

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. La empresa se reserva el derecho de corregir cualquier error en la información publicada en este folleto. © 2019 Medline Industries, Inc. Medline, HeelMedix y Heal Raiser son marcas comerciales registradas de Medline, Industries, Inc. Ultrafresh es una marca comercial registrada de Thomson Research Associates. Prevalon es una marca comercial registrada de Sage Products, Inc. MKT19W121586 / 799ESLA / 3.3M / SG / 65