



ReadyCare

Limpieza del paciente

PALANGANA

Evite las palanganas reutilizables debido a sus altas tasas de contaminación bacteriana.²

ROPA DE CAMA

Los estudios muestran que los productos textiles hospitalarios son una posible fuente de infección.³

AGUA

La AACN recomienda usar productos de higiene personal preenvasados a fin de eliminar la exposición del paciente al agua de grifo.²

EL 98% DE LAS PALANGANAS PUEDE CONTENER BACTERIAS PELIGROSAS.

Los estudios muestran que las palanganas reutilizables, la ropa de cama y el agua de grifo pueden albergar bacterias y gérmenes nocivos.

La investigación muestra que en el 98% de todas las palanganas sometidas a pruebas en un centro de atención de salud se encontraron bacterias, incluidas *S. aureus*, VRE, MRSA, *P. aeruginosa*, *C. albicans* y *E. coli*.¹



Desafíos con palanganas



JABÓN



INCONSISTENTE



PAÑO
ÁSPERO



SUCIO



AGUA DE
GRIFO



CONTAMINACIÓN
CRUZADA

Mejor que palanganas



Más Sanitario;
reduce riesgo
de infeccion
relacionado al
uso de
palanganas



**Limpieza
Estandarizada:**
Garantiza una
mayor tasa de
cumplimiento



**Mejor cuidado
de la piel: pH
balanceado,
aporta
suavidad**



**Comodidad del
paciente /
Satisfacción del
personal:** mas
rapida y
practica para el
personal



**Más costo
efectiva:** ahorra
tiempo del
cuidador, costo de
jabon, agua,
palangana y paños

ReadyBath paños para baño

Baño en la cama sin
necesidad de la
palangana.
Paños ultra gruesos
prehumedecidos con
pH balanceado sin
fragancia.
Limpiadores suaves.






Baño

CÓMO USAR: READYBATH

Con un paquete se baña el cuerpo entero
Cada paño grueso limpia cada una de las siguientes
8 áreas del cuerpo:

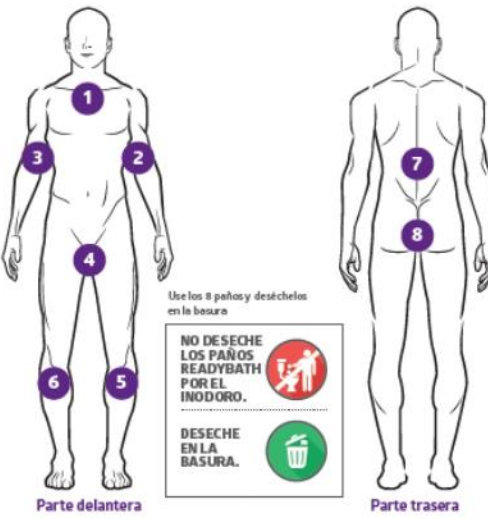

Parte delantera

Parte trasera

Uselos 8 paños y deséchelos en la basura

NO DESECHE LOS PAÑOS READYBATH POR EL INODORO.

DESECHE EN LA BASURA.



- 1 Cara, cuello y pecho
- 2 Brazo/axila izquierdos
- 3 Brazo/axila derechos
- 4 Perineo
- 5 Pierna izquierda
- 6 Pierna derecha
- 7 Espalda
- 8 Glúteos

Para obtener más información sobre ReadyBath, comuníquese con su representante de Medline, visítenos en [medline.com](https://www.medline.com) o llame al 1-800-MEDLINE.

©2016 Medline Industries, Inc. | www.medline.com | 1-800-MEDLINE | Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093
Medline y ReadyBath son marcas comerciales registradas de Medline Industries, Inc. MKT18100033 / LIT087ESLA / 3

